

## Protifix kleefcrème neutraal 40ml

ref. 6661

cnk 2054856

### Productbeschrijving

Protifix kleefcrème voor kunstgebitten met een extra sterke en langdurige werking.

Zonder bewaarmiddelen, kleurstoffen noch smaakstoffen.

### Kenmerken

Verzorging

# Protifix®



### Ingrediënten

mengsel van natrium-/calciumzouten van het copolymeer uit methylvinylether en maleïnezuuranhydride, carboxymethylcellulose, paraffine, vaseline, siliciumdioxide.

Inhoud: 47g=40ml

### Posologie

De prothese reinigen en Protifix® kleefcrème aanbrengen met tussenpozen op de natte prothese. Op het onderste derde van de tube drukken in de richting van de opening van de tube. De prothese inbrengen en enkele seconden goed aandrukken. Na gebruik de tube weer goed sluiten, de opening hierbij schoon en droog houden.

### Indicaties

In tegenstelling tot vele andere kleefcrèmes wordt Protifix® kleefcrème rechtstreeks op de natte prothese aangebracht:  
 de sterke "natte" kleefkracht treedt onmiddellijk in werking  
 een doeltreffende randafdichting helpt het binnendringen van etensresten voorkomen  
 de langdurige werking geeft u een veilig en onafhankelijk gevoel, bij het eten, spreken of zingen

### Voorzorgsmaatregelen

Enkel op het gezonde slijmvlies aanbrengen

### Analyse

	/100 g	%RI

### Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 6,22 Euro

Enkel verkrijgbaar in de apotheek

### Datum laatste wijziging

2/3/2022

*Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.*